

Istruzioni per la pulizia e la sterilizzazione



8400 Green Meadows Dr. N.
Lewis Center, OH 43035 USA
www.abrasive-tech.com



Isasan

Dispositivi: **frese per composito Whitech**

AVVERTENZE	Generali <ol style="list-style-type: none">Se i dispositivi rimarranno fermi per più di 15 minuti prima di eseguire il passaggio successivo, asciugarli accuratamente dopo ciascun passaggio.Attenersi alle istruzioni fornite dal produttore delle soluzioni o delle apparecchiature utilizzate.Le soluzioni e le apparecchiature utilizzate devono soddisfare i requisiti normativi nazionali.Questi dispositivi NON sono forniti sterili. Pulirli e sterilizzarli prima dell'uso, come indicato di seguito.
Limitazioni per il ricondizionamento	Nessuna, ad eccezione dell'usura, che sarà determinata dall'utilizzatore
Trattamento iniziale al punto di utilizzo	Ricondizionare i dispositivi appena possibile dopo l'uso. Non lasciare essiccare il materiale. Mantenere i dispositivi immersi nella soluzione dal momento in cui vengono usati finché vengono puliti; impiegare detergente enzimatico, detergente/disinfettante, detergente o acqua (in ordine di preferenza).
Preparazione in vista della pulizia	Non pertinente
Pulizia: automatizzata	<ol style="list-style-type: none">Sciacquare i dispositivi sotto abbondante acqua corrente fredda di rubinetto.Eseguire la pulizia a ultrasuoni dei dispositivi impiegando un detergente enzimatico (Premier Brite Shield™ Enzymatic Static Soak and Ultrasonic Cleaner, o un prodotto equivalente, disciolto in acqua di rubinetto) per almeno cinque minuti. Evitare il contatto tra i dispositivi durante la pulizia. Non impilare.Sciacquare accuratamente con acqua di rubinetto.
Pulizia: manuale	Non pertinente
Disinfezione	Non pertinente
Asciugatura	Asciugare i dispositivi passandovi salviette assorbenti monouso, oppure mediante calore secco o aria filtrata pressurizzata.
Manutenzione, ispezione e prova	Esaminare visivamente i dispositivi per verificare che non siano contaminati. Si consiglia di utilizzare una lente d'ingrandimento. Se i dispositivi sono ancora contaminati, ripetere i passaggi descritti in precedenza.
Confezionamento	Busta di sterilizzazione
Sterilizzazione	Sterilizzare a vapore, pre-vuoto, pressione media di 30 psi (207 kPa), minimo 4 minuti, a 132 °C, e durata minima dell'asciugatura di 22 minuti.
Magazzinaggio	Conservare i dispositivi nel materiale avvolgente sterilizzato.
Ulteriori informazioni	Nessuna
Informazioni di contatto del distributore	Isasan Srl – Via Bellini 17 – 22070 Rovello Porro (CO) – Italia – +39 (0)2 96754179

Le istruzioni di cui sopra sono state convalidate dal produttore del dispositivo medico come in grado di preparare un dispositivo medico per il suo uso o riutilizzo. La persona che esegue il ricondizionamento del dispositivo è tuttavia responsabile di garantire che il ricondizionamento, come effettivamente eseguito con le apparecchiature, i materiali e il personale della struttura, ottenga il risultato desiderato. Questo richiede la verifica e/o convalida e il regolare monitoraggio del processo. **Data di validità: 11/2019**